

Sveobuhvatni vodič za  
proizvode



# IZVRSNOST U TERAPIJI BOLI

Vodeća tehnologija rehabilitacije

## ŠTO JE ELEKTROMAGNETSKA STIMULACIJA


Serija proizvoda Salus Talent generira magnetsko polje od 3 Tesle koje je oko 600 puta jače od normalnog šipkastog magneta i prodire duboko u tijelo.

Ova snažna elektromagnetska snaga omogućila je fizioterapeutima vrlo učinkovito i osnovno liječenje akutnih i kroničnih bolova.




Snažno magnetsko polje (aplicirajući vrtložne struje duboko u unutrašnjost) prolazi kroz odjeću, tkiva i kosti, što stimulira područje liječenja duboko u tijelu.

### Elektromagnetska snaga

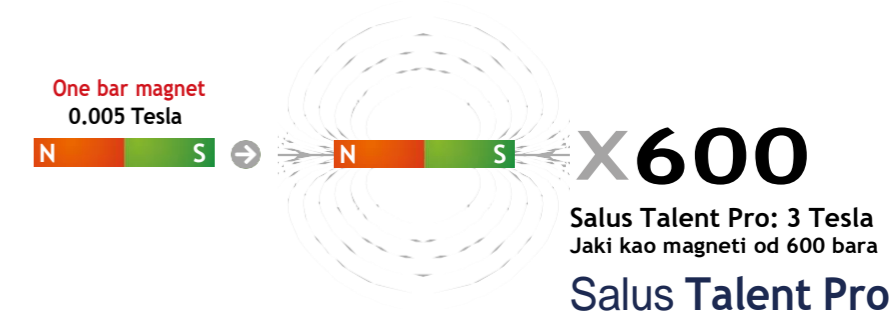


### Učinak elektromagnetske stimulacije

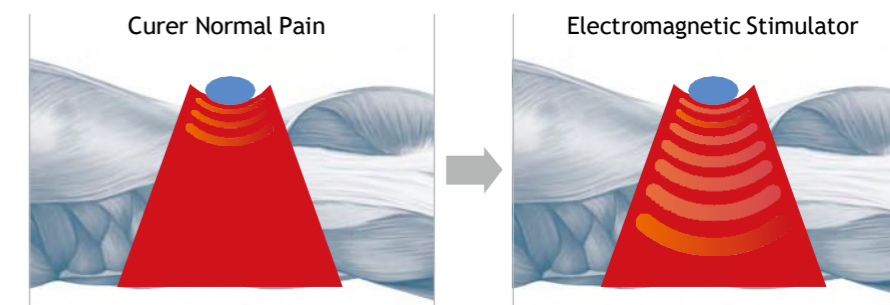

### Usporedba kliničke slike


#### Pacijent s L4 / 5 HNP

##### Prije liječenja

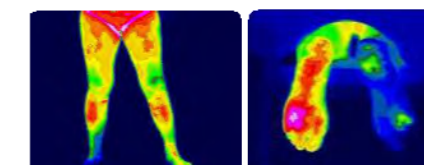

Desna noga i taban desnog stopala pokazuju nisku temperaturu zbog boli i slabe cirkulacije krvi.

##### Poslije liječenja

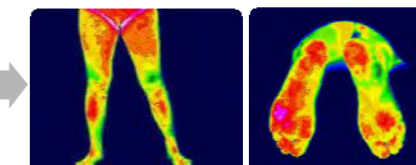

Međutim, nakon nekog elektromagnetskog liječenja, tretirana područja pokazuju normalnu temperaturu.

# Salus Talent<sup>®</sup>

Najpouzdaniji i najsnažniji uređaj za elektromagnetsku stimulaciju



## ZNAČAJKE I PREDNOSTI

- Visoko učinkovit rezultat liječenja zahvaljujući duboko prodirućem magnetskom polju od 3 Tesle
- Neinvazivna i beskontaktna sonda s pacijentom
- Jedinstveni pretvornik hlađenja cirkulacijom ulja za kontinuirano liječenje
- Širok raspon primjena protiv bolova

## SPECIFIKACIJA

	Salus Talent <sup>®</sup>
Magnetska snaga	3 Tesla $\pm$ 20%
Magnetska frekvencija	Simetrični bifazni puls, 1~100 Hz
Protokol liječenja	9 ručnih načina rada, 9 automatskih načina rada
Vrijeme liječenja	1~60 min.
Sučelje	4 Gumba, 1 Jog Shuttle
Dimenzije	46 x 52.6 x 98 Cm
Težina	30 Kg

## GLAVNA KLINIČKA PRIMJENA



Leđa



Lakat




Rame

## PODRUČJE PRIMJENE

- Ortopedija
- Rehabilitacija
- Genitourolog



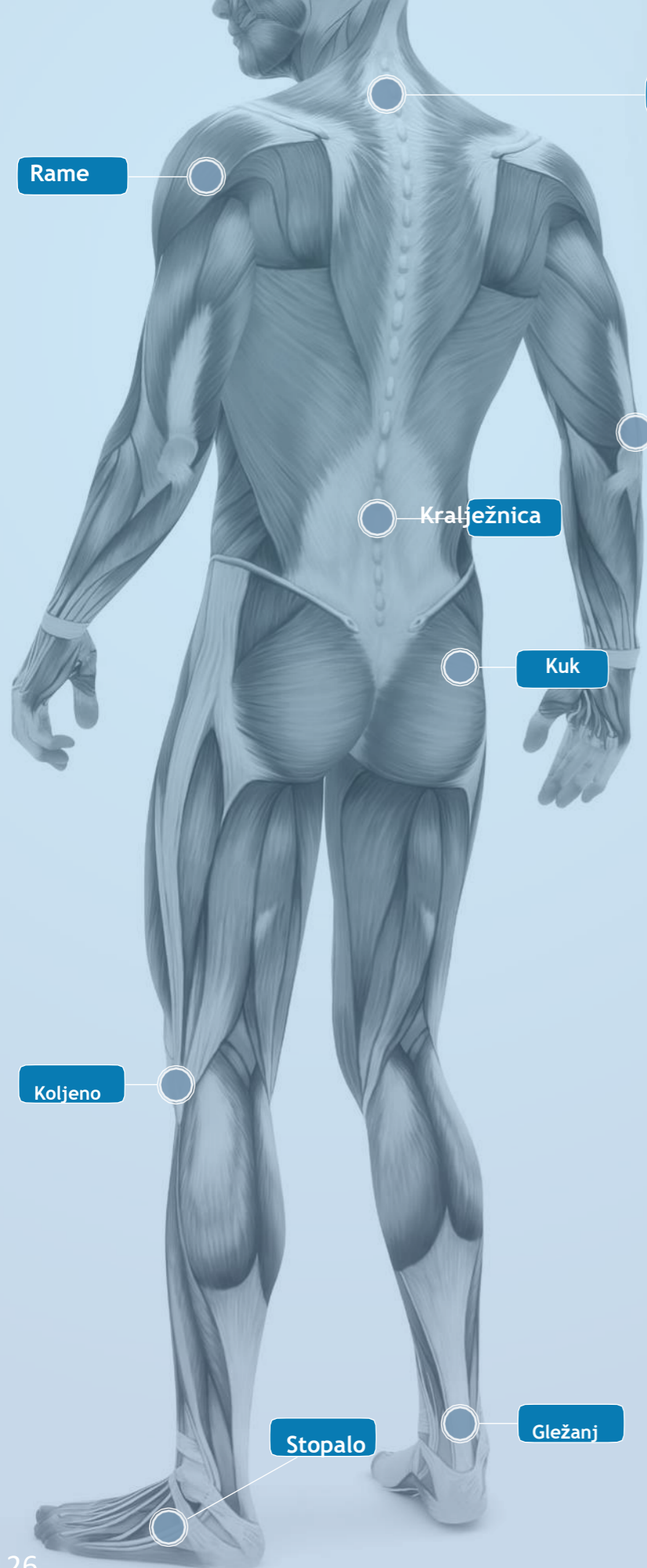

Cerviks

Rame

Lakat

Kralježnica

Kuk

Koljeno

Stopalo

Gležanj

## Kliničke indikacije

### • Salus-Talent-A

Poremećaji mišićno-koštanog sustava

Degenerativni artritis, reumatoidni artritis, cervikalna bol, sportske ozljede, smrznuto rame, opuštanje mišića, kontrola boli nakon prometne nesreće

Poremećaji kralježnice

Akutni/kronični lumbago, giht kuka (išijas), spinalna bifida, spondilitis, kronična bol u leđima, bolest spinalnog diska, IMS tretman, TPI tretman



Pulsus Medical d.o.o.  
T: + 385 1 6626 546  
info@pulsusmedical.hr  
www.pulsusmedical.hr



# IZVRSNOST U TERAPIJI BOLI

Vodeća tehnologija rehabilitacije