



HRV

WKB001
Korisni ki priru nik
WE-2020-WKB001-1

LIMFNA DRENAŽA



Tvrtka zadržava pravo izmjene detalja ure aja bez prethodne najave. Ako se u ovim uputama na u bilo kakve pogreške, slobodno nam pošaljite poruku e-pošte s informacijama kako bismo ih mogli ispraviti.

SADRŽAJ PAKETA

- Ove se komponente mogu mijenjati bez prethodne najave.

- Izgled proizvoda može se razlikovati od slike.

Br.	PROIZVOD	KOL.
1	DESNA NOGA	1
2	LIJEVA NOGA	1
3	DESNA RUKA	1
4	LIJEVA RUKA	1
5	DESNO STOPALO	1
6	LIJEVO STOPALO	1
7	STRUK	1
8	DEKA ZA CIJEVI	1
9	CIJEVI	1
10	GLAVNA JEDINICA	1
11	KABEL ZA NAPAJANJE	1

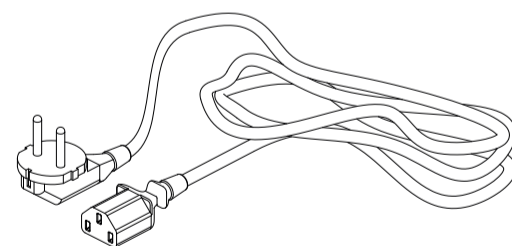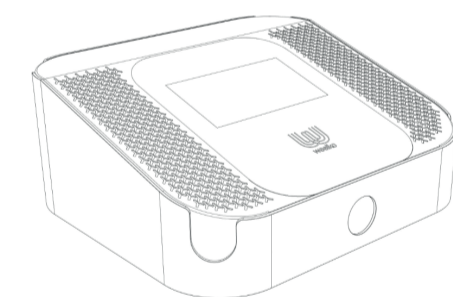

UPOZORENJE

- Ni u kojem slu aju ne pokušavajte otvoriti ili pregledati unutarnje dijelove ili dodatke ure aja. Ako pregled postane potreban, kontaktirajte svog dobavlja a ili odgovaraju e kompetentnog tehni ara.

- Nikada nemojte koristiti ure aj u vlažnom ili slabo prozra enom okruženju, kao što su mokre sobe, kupaonice itd., kako biste sprije ili ošte enje elektri nih dijelova Vašeg ure aja.

- Nikada nemojte koristiti ure aj na otvorenom; izlaganje elementima može prouzro iti štetu.

- Ako je kabel za napajanje uništen, zamolite stru njaka da ga servisira i zamijeni kako bi se izbjegle opasnosti ili se obratite prodava u za servis.

- Ne upotrebljavajte na trudnicama, osobama s stimulatorom srca (bilo kojim elektri nim ili ritmi kim ure ajem za regulaciju srca) ili s infekcijama kože.

EK - IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj proizvod ispunjava sljede e zahtjeve:

1. Uvjeti navedeni u Direktivi o niskonaponskoj opremi: 2014/35/EU

2. Uvjeti navedeni u Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti: 2014/30/EU

RECIKLAŽA



Kad god bilo koji od naših elektri nih proizvoda ili njihova prezentacijska

ambalaža nosi ovaj simbol, to zna i da se ti proizvodi u Europi ne bi trebali tretirati kao uobi ajeni ku ni otpad. Da biste osigurali pravilnu obradu ovog otpada, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima ili prema potrebi za odlaganje elektri ne opreme. Ova inicijativa pomo i e u o uvanju prirodnih resursa i poboljšati standarde zaštite okoliša u pogledu postupanja s elektri nim otpadom.

DOBRODOŠLI!

Puno Vam hvala na kupnji. Molimo pažljivo pro itajte upute prije rada s ure ajem. Tako er možete zatražiti stru nu pomo da biste bili sigurni da pravilno upotrebljavate ure aj. Ne prihva amo nikakvu odgovornost za bilo kakve nezgode koje se dogode uslijed nepravilnog rada.

UPUTE ZA UPOTREBU

1. Spojite kabel za napajanje preko stražnje plo e.

2. Spojite cijevi pravilno na stražnju plo u. Slijedite numeri ke upute.

3. Stavite deku s kabelima na ravnu površinu tako da pacijent može le i na nju. Deku pokrijte papirom za jednokratnu upotrebu kako biste osigurali najbolje higijenske uvjete.

4. Omotajte odijelo oko tijela korisnika. Ne zaboravite koristiti odje u za jednokratnu upotrebu ispod odijela za limfnu drenažu.

5. Uklju ite gumb za napajanje na prednjoj plo i i kliknite Weelkov logotip za odabir željenih izbornika.

6. Izbornik "MODE" omogu uje Vam odabir izme u etiri programa. Preporu uje se zapo eti s C, a ostale programe odabrati ovisno o potrebama pacijenta.

prilagodite njegov intenzitet tipkama "+" i "-".

7. Izbornik "LEVEL" omogu uje podešavanje 3 razine intenziteta napuhavanja.


8. Izbornik "TIME" omogu uje podešavanje vremena tretmana. Zadano trajanje je 30 minuta.

9. Pritisnite "PLAY / PAUSE" za zapo injanje ili pauziranje tretmana.

ODRŽAVANJE

- Pažljivo spojite i odvojite cijevi kako biste produžili vijek trajanja proizvoda. Me utim, ovaj je ure aj isporu en s dekom za spremanje kabela tako da su svi istovremeno povezani ili odspojeni. Treba priklju iti i odspojiti samo kabel za napajanje na stražnjem dijelu ure aja.

- Nakon upotrebe, odijelo o istite mokrom krpom.

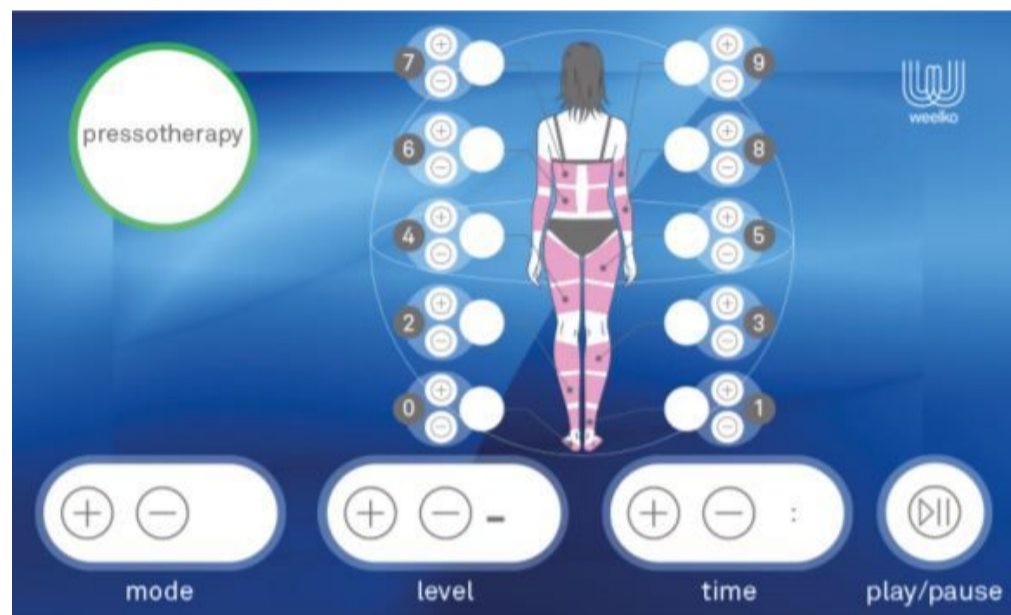

- Program A ispunjava zra ne dijelove od 0 do 9. Odjeljak 0 ispuhan je kad je odjeljak 1 napuhan. Odjeljak 1 je ispuhan kada je odjeljak 2 napuhan i tako dalje iz jednog odjeljka u drugi. Na kraju programa istodobno se napuhuju odjeljci od 0 do 9 i program zapo inje ponovno.

- Program B ispunjava zra ne dijelove od 0 do 9. Odjeljak 0 ispuhan je kad je odjeljak 2 napuhan. Odjeljak 1 ispuhan je kada je odjeljak 3 napuhan i tako dalje s jedne na drugu stranu. Na kraju programa istodobno se napuhuju odjeljci od 0 do 9 i program zapo inje ponovno.

- Program C ispunjava zra ne dijelove od 0 do 9. Prvo je odjeljak 0 napuhan, zatim odjeljak 1, kasnije odjeljak 2 i tako dalje kroz sve odjeljke. Na kraju, program ponovno zapo inje od odjeljka 0.

- Program D istodobno ispunjava zrakom tri odjeljka: noge, trbuh i ruke odozdo prema gore.

Ako ne želite koristiti programirani na in rada, ure aj omogu uje zaseban odabir odjeljaka i podešavanje intenziteta napuhavanja svakog odjeljka. Samo trebate pritisnuti podru je koje želite lije iti i

OPREZ

- Pazite da zra ni jastuk ne zamotate pre vrsto, da ne ozlijedite korisnike kada je zrak prejak.

- Provjerite jesu li sve cijevi pravilno spojene.

- Tlak zraka ne smije se postavljati previsoko kako bi se izbjeglo nanošenje boli.

- Kada ure aj radi, uz njega mora biti stru njak koji ga kontrolira.

- Upotrijebite zaštitu od celuloze ispod odijela za limfnu drenažu kako biste osigurali najbolje higijenske uvjete.

PRIBOR

DESNA NOGA
LIJEVA NOGA
DESNA RUKA
LIJEVA RUKA
STRUK
DESNO STOPALO
LIJEVO STOPALO
CIJEVI

TEHNI KI LIST

Težina i dimenzije	Veli ina pakiranja (cm)	66x45x40
	Bruto težina (kg)	18,5
	Veli ina proizvoda (cm)	34x38x15
Karakteristike rada	Radna snaga	50 W
	Tlak zraka	0-0,4 kg/cm ²
	Protok zraka	0,40 L/min.
	Ritam tlaka zraka	0-15 s.
	Zra ni kanali	10
Elektri ne karakteristike	Nazivni napon	220V ~ 240V
	Frekvencija	50Hz/60Hz
	Nazivna snaga	50 W